

KLINISK KEMIHandläggare
AG, MTB/th

Direkttelefon

Datum
2023-10-04
Ert datumVår beteckning
16-2023
Er beteckning

Till våra beställare

Nytt provrör för B-SR från den 7 november 2023De nya provrören beställs via inköpsportalen, **artikelnummer: 10027510.****Viktigt att förmedla till provtagare**

- Det nya provröret är smalare och har en mindre dragvolym.
- Provröret måste minst vara fyllt till den vita markeringen på rörets etikett. För liten provvolym kan inte analyseras.
- Blanda provröret 10 gånger direkt efter att det fyllts med blod för att motverka koagel. Luftpelaren ska vandra från toppen till botten vid varje blandning. Provrör som innehåller koagel kan inte analyseras.

Ändrad svarsrutin

- Provsvar över 100 mm/h kommer att besvaras >100 mm/h.

Övrigt

- Provrören från BD kan användas parallellt med de nya provrören under en övergångsperiod.
- Metoden är samma som tidigare, det vill säga, Westergrens metod (modifierad)

Vid ytterligare frågor kontaktas metodansvarig.


Anna Gustafsson
Metodansvarig Patientnära analys
Telefon 010-83 915 66
anna.m.gustafsson@regionvarmland.se
Milijana Berglund Tijanic
Specialistläkare