

Lathund för hantering bildkort i Tears

För att kunna exportera helstatus samt intraorala bilder samlade i en fil. I stället för enstaka bilder och filer.

Källa – välj den aktiva seriens layout

Källa

- Valda bild(er)
- Alla lokala bilder på patienten
- Alla bilder i sökresultat
- Alla bilder på klippbordet
- Alla bilder i aktiv serie
- Den aktiva seriens layout

Seriers/bildkortets utseende på skärmen
Filnamn = seriens namn, datum, tid
Den exporterade filens bredd i pixlar

Alternativ

- Skicka e-postmeddelande med fil(er) bifogade

Filformat – välj JPG

Filformat

- Exportera originalbild(er)
- Inkludera ritade objekt
-
- Reducera alla gråskalebilder till 8 bitar

Kvalitet Liten filstorlek

Patientinformation

- Skapa DICOMDIR
- Skapa DCZ-fil med DICOMDIR
- Aidentifiera
-

Avsluta med OK

Översiktsbild

Källa

- Valda bild(er)
- Alla lokala bilder på patienten
- Alla bilder i sökresultat
- Alla bilder på klippbordet
- Alla bilder i aktiv serie
- Den aktiva seriens layout

Seriens/bildkortets utseende på skärmen
Filnamn = seriens namn, datum, tid
Den exporterade filens bredd i pixlar

Alternativ

- Skicka e-postmeddelande med fil(er) bifogade

Filformat

- Exportera originalbild(er)
- Inkludera ritade objekt
- JPG**
- Reducera alla gråskalebilder till 8 bitar

Kvalitet Liten filstorlek

Patientinformation

- Skapa DICOMDIR
- Skapa DCZ-fil med DICOMDIR
- Aidentifiera
- Ingen infoetikett

OK **Avbryt**