

Dokumenttyp Rutin	Ansvarig verksamhet Smittskydd Värmland	Version 1	Antal sidor 1
Dokumentägare Maria Jonsson Hygijensjuksköterska	Fastställare Anna Skogstam Bitr. smittskyddsläkare	Giltig fr.o.m. 2019-03-07	Giltig t.o.m. 2021-03-06

## Rengöring av madrasser och kuddar

Gäller för: Hälso- och sjukvård

### Madrasser

- Markera datum och årtal på madrassen när den börjar användas.
- Madrassen ska vara försedd med överdrag som kan ytdesinfekteras, antingen avtagbart eller integrerat på madrassen s.k. skyddsfolie.
- Vid rengöring av säng ska madrassöverdraget inspekteras så att det är rent och torrt. Leta efter fläckar, revor, hål, sömmar och dragkedjor som gått sönder. Vid svårt nedsmutsat madrassöverdrag/madrass med skyddsfolie som inte går att få synligt rent ska det kasseras.
- Trasigt madrassöverdrag/madrass ska kasseras.
- Specialmadrasser som är tillverkade för specifika vårdtillfällen ska rengöras enligt tillverkarens råd.
- Vid smitta rengörs madrassen enligt rutin för respektive smitta.

### Kuddar

- Kuddar med avtorkningsbart överdrag avtorkas. Om fläckar finns kvar på överdraget efter avtorkning med ytdesinfektionsmedel så ska det tvättas.
- Nedsmutsat avtagbart kuddöverdrag ska tvättas i minst 60 grader.
- Vid skadat överdrag skickas kudden på tvätt och överdraget slängs.
- Kudde med engångs plastöverdrag ska bytas efter varje patient. Viktigt att plasten täcker hela kudden.
- Svårt nedsmutsad och trasig kudde ska kasseras.
- Specialkuddar/stödkuddar av specifikt material ska rengöras enligt tillverkarens råd.
- Vid smitta skickas kudden på tvätt enligt rutin för respektive smitta.

Dokumentet är utarbetat av: Maria Jonsson och Ann-Mari Gustavsson